

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas nas Instruções de Uso (IU) dos nossos produtos, a ITS do Brasil em acordo com a IN ANVISA Nº 4, DE 15 DE JUNHO DE 2012 - Dispõe sobre a disponibilização de instruções de uso de produtos para saúde em meio eletrônico www.itsdobrasil.com.br, no Menu "Instruções de Uso".

Se necessário obter a Instrução de Uso impresso, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 11 91291-8889 ou pelo e-mail contato@itsdobrasil.com.br.

Recomenda a leitura de toda a Instrução de Uso antes da utilização do produto.

ITS Urys - Dispositivo Externo de Incontinência Urinária Masculino

Instrução de Uso

Apresentação Comercial

URYL-01020; URYL-01025; URYL-01030; URYL-01035; URYL-01040;
URYS-02020; URYL-02025; URYL-02030; URYL-02035; URYL-02040;
URYL-01020E; URYL-01025E; URYL-01030E; URYL-01035E; URYL-01040E;
URYS-02020E; URYL-02025E; URYL-02030E; URYL-02035E; URYL-02040E;
URYL-01020BC; URYL-01025BC; URYL-01030BC; URYL-01035BC;
URYL-01040BC; URYL-02020BC; URYL-02025BC; URYL-02030BC;
URYS-02035BC; URYL-02040BC.

Indicações de Uso

O dispositivo externo de incontinência urinária masculino ITS URYL é indicado para coleta de urina em pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária.

Princípio de Funcionamento

O dispositivo externo de incontinência urinária masculino ITS URYL funciona como um drenante da urina que é expelida sem controle dos esfínteres urinários. O produto em látex médico e/ou silicone médico facilita a drenagem para uma bolsa externa, mantendo o paciente seguro contra infecções e dermatoses. Este produto evita a inserção de cateteres uretrais.

Utilização do Produto

- Faça uma inspeção minuciosa da embalagem para identificar possíveis rupturas da embalagem ou danos ao dispositivo;
- Caso encontre alguma irregularidade no produto ou embalagem, descarte imediatamente e prossiga com a abertura de um novo dispositivo;
- Observe a data de validade do produto, se a mesma se encontrar expirada, providencie um novo dispositivo;
- Abra a embalagem utilizando-se de técnicas assépticas;
- Desenrole o preservativo cuidadosamente para não o furar;
- Acople e ajuste o preservativo no pênis do paciente;
- Coloque a extremidade do tubo do produto em um recipiente (bolsa coletora) para a captação da urina;
- Após o uso, descarte os resíduos conforme PGRSS padronizado pelo hospital.

Precauções

Descarte o produto em local seguro.

Advertências

- Produto de uso único;
- Descartar em local adequado após sua utilização;
- Garantir que as conexões com o sistema estão firmes e seguras para reduzir o risco de desconexão acidental;
- Proibido o reprocessamento;
- Se o prazo de validade estiver expirado, descarte imediatamente.

Condições de Armazenamento

As seguintes condições de armazenamento devem ser observadas:

- Armazenar em temperatura entre 0 e 50°C;
- Umidade relativa deve estar abaixo de 80%;
- Não colocar objetos pesados sobre a embalagem;
- Evitar bater a embalagem ou amassar;
- Manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

Prazo de Validade

Vide rotulagem em embalagem externa.

REGISTRO ANVISA: 82130510008

Fabricado por:

ITS do Brasil Ind. E Com. de Prod. Médicos Eireli
Avenida Presidente Kennedy, 3500 – Santa Paula – CEP: 09572-200 -
São Caetano do Sul – SP
Resp. Téc: Simone da S. B. Lima CRF/SP: 38.817

