

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas nas Instruções de Uso (IU) dos nossos produtos, a ITS do Brasil em acordo com a IN ANVISA Nº 4, DE 15 DE JUNHO DE 2012 - Dispõe sobre a disponibilização de instruções de uso de produtos para saúde em meio eletrônico www.itsdobrasil.com.br, no Menu "Instruções de Uso".

Se necessário obter a Instrução de Uso impresso, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 11 91291-8889 ou pelo e-mail contato@itsdobrasil.com.br.

Recomenda a leitura de toda a Instrução de Uso antes da utilização do produto.

Torneirinhas Multivias (Manifold)

Instruções de Uso

Apresentações Comerciais

TMVM-3333 - Torneirinha multivias 3 vias alta pressão;

TMVM-3344 - Torneirinha multivias 4 vias alta pressão;

TMVM-3355 - Torneirinha multivias 5 vias alta pressão;

TMVM-3366 - Torneirinha multivias 6 vias alta pressão;

TMVM-3377 - Torneirinha multivias 7 vias alta pressão.

Indicações de Uso

As torneirinhas multivias ITS do Brasil são indicadas para adaptação em linhas de infusão durante terapia infusional ou sistemas de monitorização venosa e arterial. Sua configuração permite a infusão de 2 ou mais soluções em uma mesma linha, facilitando a dinâmica durante a terapia infusional.

Princípio de Funcionamento

As torneirinhas multivias ITS do Brasil são utilizadas para terapia infusional em dispositivos venosos e arterial, centrais ou periféricos, facilitando a linha de infusão de 2 ou mais soluções em uma mesma linha de maneira segura e prática. dois ou mais mecanismos podem ser acoplados para aumentar o número de saídas do produto..

Utilização do Produto

- Faça uma inspeção minuciosa da embalagem para identificar possíveis rupturas da embalagem ou quebra do dispositivo;
- Caso encontre alguma irregularidade no produto ou embalagem, descarte imediatamente e prossiga com a abertura de um novo dispositivo;
- Retire o dispositivo da embalagem primária;
- Conecte quantas linhas forem necessárias para administração de soluções no paciente;
- Remova o protetor da porta macho e segure na posição vertical;
- Limpe com álcool a conexão fêmea da linha de infusão e conecte à torneirinha;
- Abra os clamps das linhas de infusão e desbloqueie o ar girando a torneira para a posição aberta;
- Gire a torneirinha para a posição fechada;
- Conecte o sistema ao dispositivo de punção venosa e prenda-o com a trava de rotação;
- Gire a torneirinha para a posição aberta e ajuste o fluxo do conjunto de infusão;
- Após o uso, descarte os resíduos conforme PGRSS padronizado pelo hospital.

Precauções

Manipulação estéril;
Após infusão de hemoderivados, deve ser realizada a substituição imediata, caso fique resíduos após a lavagem do sistema.
A troca das tampas após cada abertura é obrigatória; Toda a manipulação da linha de infusão deve ser estéril;
Realize a desinfecção ativa ou passiva nas conexões, durante a manipulação.

Advertências

Produto de uso único;
Descartar em local adequado após sua utilização;
Garantir que as conexões com o sistema estão firmes e seguras para reduzir o risco de desconexão acidental;
Proibido o reprocessamento;
Se o prazo de validade estiver expirado, descarte imediatamente.

Condições de Armazenamento

- Armazenar em temperatura entre 0 e 50°C;
- Umidade relativa deve estar abaixo de 80%;
- Não colocar objetos pesados sobre a embalagem;
- Evitar bater a embalagem ou amassar;
- Manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

Prazo de Validade

Vide rotulagem em embalagem externa.

REGISTRO ANVISA: 82130510007

Fabricado por:

ITS do Brasil Ind. E Com. de Prod. Médicos Eireli
Avenida Presidente Kennedy, 3500 – Santa Paula –
CEP: 09572-200 - São Caetano do Sul – SP
Resp. Téc: Simone da S. B. Lima CRF/SP: 38.817

